

ЛІЖКО ФУНКЦІОНАЛЬНЕ
ЛФ-9
Керівництво з використання
(ТУ У 32.5-32256828-007:2013)



Затверджено 15.01.18 р.
Версія № 1

Зміст

	Стор.
Вступ	3
1 Призначення	3
2 Зовнішній вигляд	3
3 Технічні характеристики	3
4 Дезінфекція і стерилізація	4
5 Правила транспортування	4
6 Правила зберігання	4
7 Гарантії виробника	4
8 Свідоцтво про приймання	5
10 Гарантійний талон	5

ВСТУП

Керівництво, сумісне з паспортом та інструкцією з експлуатації являє собою документ, що підтверджує гарантовані виробником основні технічні параметри і характеристики ліжка функціонального ЛФ-9.

1 ПРИЗНАЧЕННЯ

Ліжка функціональні призначені для лікування хворих з захворюваннями нервово-м'язової, серцево-судинної системи та інших захворювань, які потребують особливих умов догляду. Ліжка встановлюють в реанімаційних, післяопераційних палатах різних відділень лікарень, в інших установах системи охорони здоров'я, а також можуть використовуватись для загального догляду за хворими в домашніх умовах.

2 ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД


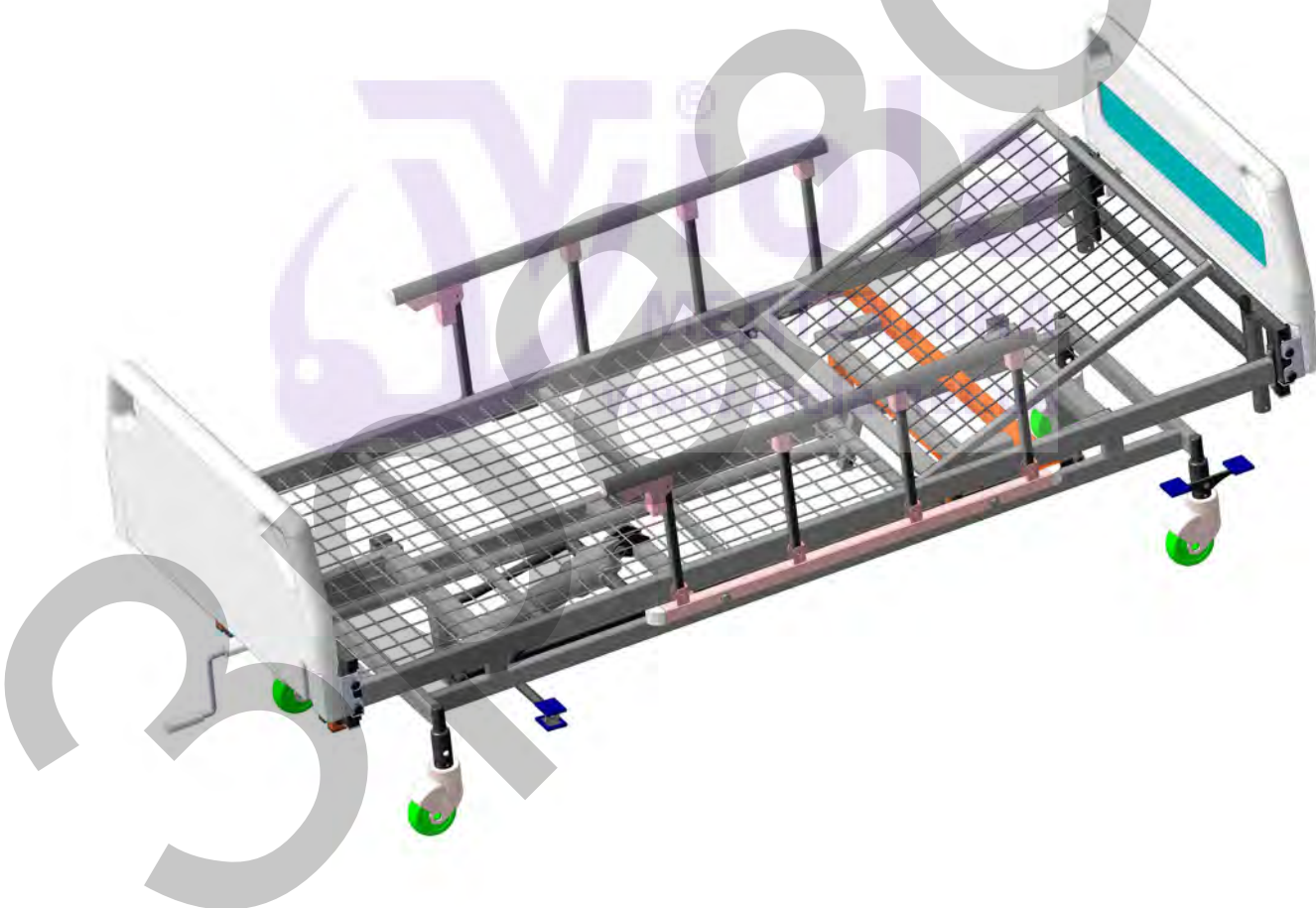


Рисунок 1

3 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Конструкція

3.1.1 Конструктивно ліжко складається з наступних елементів: рама підйомна, яка виготовлена із профільної труби 40х25 і ложа ліжка. Ложе ЛФ-9 складається з 1-ї рухомої секції, конструкція являє собою дротяну сітку з осередками 50мм/50мм, зварених з металу діаметром 4 мм. Більця (виготовлені з пластику), основа (на 4-х само орієнтованих колесах (діаметром 100 мм) два, з яких оснащені гальмівною системою). Постачається в розібраному вигляді. Ліжка додатково (опція) можуть бути оснащені матрацом, штативом, опорним тримачем, столиком надліжковим, бічними огорожами, підставкою під судно. Регулювання висоти ложа : min 470-770мах.

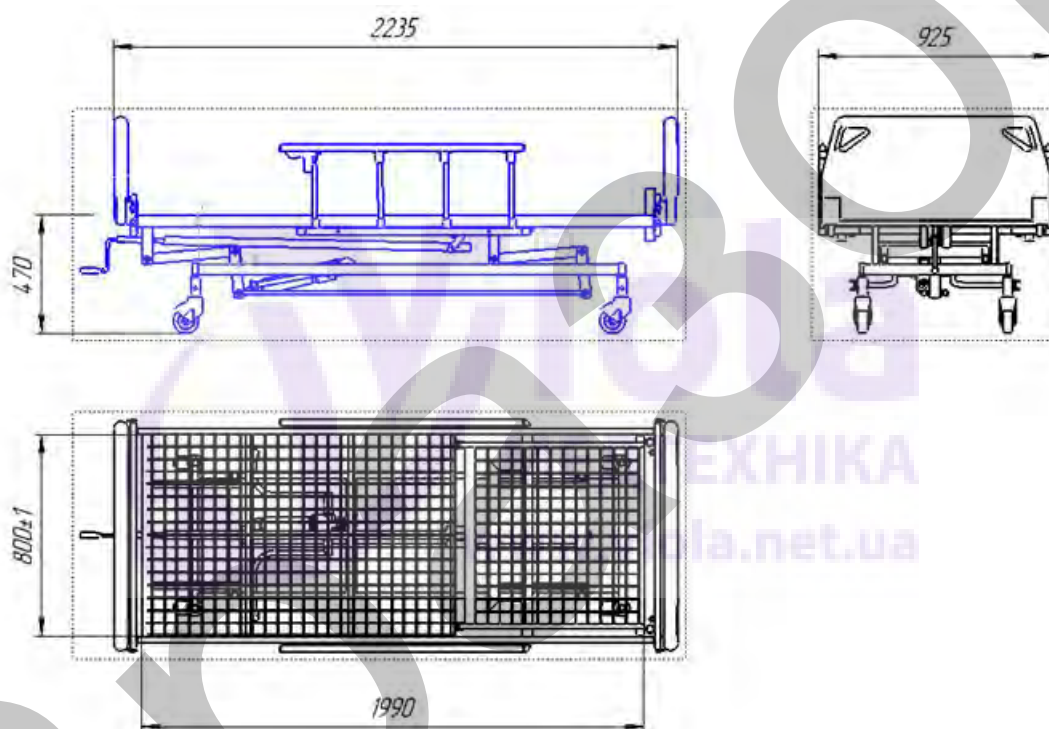

4 ДЕЗІНФЕКЦІЯ И СТЕРИЛІЗАЦІЯ

4.1 Санітарну обробку проводити 3 % -ним розчином перекису водню з 0,5 % розчином синтетичного миючого засобу.

Періодичність обробки один раз на день.

При проведенні санітарної обробки не допускати попадання дезінфікуючої рідини в очі і на відкриті ділянки тіла.

4.2 Допускається використовувати інші дезінфікуючі засоби, дозволені для обробки поверхонь в медичних установах.

5 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Перевезення проводиться в упаковці з дотриманням заходів захисту від негативних дій зовнішніх факторів.

6 ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ

Кушетку зберігати в закритих сухих (не більше 75 % відносної вологості) приміщеннях при температурі від +5°C до +40 °C .

7 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

7.1 Виробник гарантує відповідність технічним характеристикам при дотриманні користувачем умов експлуатації, транспортування і зберігання.

7.2 Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців з дня продажу виробу.

7.3 Протягом гарантійного терміну виробник забезпечує безкоштовний ремонт по пред'явленню користувачем гарантійного талона.

8 СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Ліжко функціональне _____

заводський номер _____ відповідає технічним вимогам

ТУ У 32.5-32256828 – 007: 2013 і визнано придатним до експлуатації.

Дата випуску _____

Відповідальний за приймання _____

НВП «Медпромсервіс», м. Полтава, вул. Комарова 5, (0532) 509-52

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

На ремонт протягом гарантійного терміну

Ліжко функціональне _____

Заводський № _____

Дата випуску _____

Придбаний _____

(дата, підпис і штамп торгової організації)

Введений в експлуатацію _____

(дата, підпис)

Прийнятий на гарантійне обслуговування ремонтним підприємством

міста _____

Підпис керівника _____

і печатка ремонтного підприємства

Підпис керівника _____

і печатка установи власника